



BRTLM-001

TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B



Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection



Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Protezione da Particelle Solide - Type 5-B
Hazardous Dry Particles Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
 $L_{jmn, 82/90} \leq 30\%$



Protezione Limitata da Schizzi di Sostanze Chimiche Liquide - Type 6-B
Lightly Sprayed Particles Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
 $L_{jmn, 82/90} \leq 30\%$

TUTA
PROTETTIVA
MONOUSO

DISPOSABLE
COVERALL

RESANO

TAGLIE
SIZES

Small

Medium

Large

X Large

2X Large

3X Large

PETTO
CHEST

84-92 cm

92-100 cm

100-108 cm

108-116 cm

116-124 cm

124-132 cm

ALTEZZA
SIZE

162-170 cm

168-176 cm

174-182 cm

180-188 cm

186-194 cm

192-200 cm

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell'utilizzo per evitare eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia. Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.

ATTENZIONE!

- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le tute protettive Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).

LIMITAZIONI DI UTILIZZO

Rimuovere la tuta con cautela dopo l'utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto diretto con la tuta dopo l'utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente da materiali infettivi. La scelta e la responsabilità dell'uso di tute di protezione di tipo 5/6 spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell'utilizzatore stabilire l'idoneità della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l'elettricità statica generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull'utente deve essere inferiore a 10^8 ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente di lavoro sul comfort di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.

COME INDOSSARE LA TUTA

Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le braccia all'interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.

CONSERVAZIONE/SCADENZA

Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.

SMALTIMENTO E RICICLO

I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.



NON LAVARE
Not washing



NON ADATTO ALL'ASCUGATRICE
No drying



NON LAVARE A SECCO
No cleaning



NON STIRARE
No ironing



NON CANDEGGIARE
No bleach



LONTANO DAL FUOCO RESISTI
Keep away from fire

CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGTH CLASSES	
Resistenza all'Usura Wear Resistance	Classe 6 Class 6
Resistenza Strappo Tear Resistance	Classe 2 Class 2
Resistenza Trazione Tensile Strength	Classe 1 Class 1
Resist. Perforazione Puncture Resistance	Classe 1 Class 1
Resist. cucitura Stitching Strength	Classe 1 Class 1

VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT PERFORMANCE VALUES

Per EN 13034:2005+A1:2009:

Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione: Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30% liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3

Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3 Sodium Hydroxide (H2SO4) 30% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Infiltrazione all'interno: Ljmn, 82/90 < 30% LS, 8/10 < 15 %; EN 14126:2003+AC:2004. Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372; Classe 3 secondo la tabella 4.

For EN 13034: 2005 + A1: 2009:

It has been tested for resistance to penetration of liquids in light spray form (fog experiment). Type PB [6], partial body protectors, have not been subjected to complete clothing set test. Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 %

For EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010; Ljmn,

82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 % EN
14126:2003+AC:2004 ATCC 9372 Bacillus subtilis spores were used in the tests. Class 3 according to Table 4

RIVENDITORE:

TURIN EVENTS S.A.S.

C.so Duca degli Abruzzi, 34 - 10129 Torino - www.turinevents.it

Tel. 011 024.32.82 - P. Iva 11551770016 - amministrazione@turinevents.it